

# Décontamination du matériel

18 janvier 2000

- Mettre une paire de gants
- Passer le matériel sous l'eau et le brosser s'il est très souillé
- Remplir le bac de décontamination:
  - 1 sachet d'instruzyme pour 5 l. d'eau tiède
- Noter la date et l'heure sur le couvercle du bac (velleda)
- Laisser tremper le matériel 15 minutes
  - (Attention: si le temps de trempage est trop long, le produit risque de léser le matériel)
- Rincer le matériel et le sécher
- La solution décontaminante étant stable 24 heures, le bac sera vidé, rincé et séché passé ce délai.
- Le couvercle doit rester fermé pendant et hors des temps de trempage pour assurer sa stabilité

***N. B: Cette procédure doit être obligatoirement appliquée au matériel destiné à être stérilisé***